

Mantas Térmicas para Animais - Descartáveis




Mantas Térmicas para aquecimento de animais

As mantas Cocoon são de tecido não tecido macio, confortável e leve. Todos os materiais utilizados nas mantas são isentas de látex. As perfurações microscópicas exclusivas fornecem distribuição de ar uniforme sem o risco de resíduos. Os atilhos da entrada universal garantem que a manga permaneça firmemente colocada na manta. Os laços e o tecido resistente permitem o uso da mesma manta no paciente desde o pré-aquecimento, passando pela cirurgia até a recuperação.

Indicações de uso

- Uma almofada para incontinência pode ser colocada sob o animal na área central.
- Coloque a manta por baixo ou por cima, dependendo do modelo da manta.
- O lado branco da manta deverá ficar voltado para o animal.
- Insira a manga do aquecedor em qualquer porta de entrada da manta.
- Não obstrua o tubo de insuflação na entrada da manta ou ao fechar a porta da gaiola (dependendo do modelo da manta).
- Monitorize a temperatura do animal com frequência. Deverá ser seguido o protocolo do hospital/clinica.
- Substitua a manta se estiver molhada ou suja.
- Posicione o animal dorsal ou lateralmente.

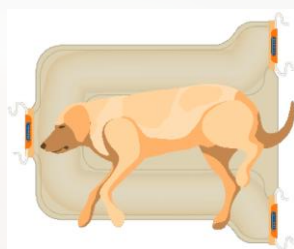

- Modelo: VET001
- Nome: Cocoon vet manta acesso total, médio a grande
- Dimensões: 126cm largura x 79cm comprimento
- Entradas: 3
- Indicações de uso: Anestesia e Cirurgia
- Descrição: Manta "under body" para porte médio/grande
- Unidades/cx: 10



- Modelo: VET002
- Nome: Cocoon Vet manta acesso total, pequeno
- Dimensões: 86cm largura x 79cm comprimento
- Entradas: 3
- Indicações de uso: Anestesia e Cirurgia
- Descrição: Mesmo design da VET001 com menores dimensões
- Unidades/cx: 10

Mantas Térmicas para Animais - Descartáveis



Mantas Térmicas para aquecimento de animais



- Modelo: VET003
- Nome: Cocoon vet manta colocação posterior, médio a grande
- Dimensões: 123cm largura x 83cm comprimento
- Entradas: 2
- Indicações de uso: Animal enjaulado, cuidados críticos, recobro
- Descrição: Manta “over body” para porte médio/grande
- Unidades/cx: 10



- Modelo: VET004
- Nome: Cocoon Vet colocação posterior, pequeno
- Dimensões: 66cm largura x 86cm comprimento
- Entradas: 2
- Indicações de uso: Animal enjaulado, Anestesia, cuidados críticos, recobro
- Descrição: Mesmo design da VET003 com menores dimensões
- Unidades/cx: 10





- Modelo: VET005
- Nome: Cocoon Vet colocação posterior, grande (L)
- Dimensões: 100cm largura x 120cm comprimento
- Entradas: 1
- Indicações de uso: Anestesia, cuidados críticos, recobro
- Descrição: Manta “over body” para porte grande
- Unidades/cx: 30



- Modelo: VET006
- Nome: Cocoon Vet colocação posterior, extra grande (XL)
- Dimensões: 100cm largura x 195cm comprimento
- Entradas: 1
- Indicações de uso: Anestesia, cuidados críticos, recobro
- Descrição: Manta “over body” para porte extra grande
- Unidades/cx: 30

Mantas Térmicas para Animais - Descartáveis

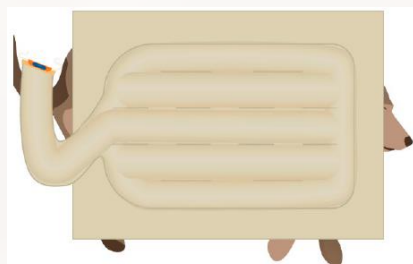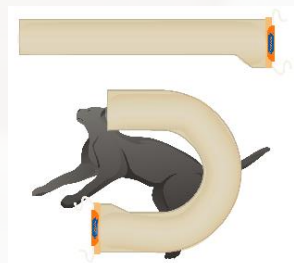

Mantas Térmicas para aquecimento de animais

- Modelo: VET007
 - Nome: Cocoon vet tubo manta, médio a grande
 - Dimensões: 14cm largura x 180cm comprimento
 - Entradas: 1
 - Indicações de uso: Animal enjaulado, Anestesia, cuidados críticos, recobro
 - Descrição: Manta tubular para médio a grande porte
 - Unidades/cx: 30
-
- Modelo: VET008
 - Nome: Cocoon vet tubo manta, pequeno a médio
 - Dimensões: 14cm largura x 99cm comprimento
 - Entradas: 1
 - Indicações de uso: Animal enjaulado, Anestesia, cuidados críticos, recobro
 - Descrição: Mesmo design da VET007 com menores dimensões
 - Unidades/cx: 30

Inovação única Cocoon

Benefícios:


- Aquece o animal diretamente na porta da jaula/canil.
- Design versátil para permitir que a entrada se ajuste a qualquer tamanho de jaula/canil.
- Acesso contínuo sem interrupção da terapia de aquecimento.

- Modelo: VET009
- Nome: Cocoon vet manta colocação posterior, grande
- Dimensões: 100cm largura x 120cm comprimento
- Entradas: 1
- Indicações de uso: Anestesia, cuidados críticos, recobro
- Descrição: Ideal para terapia pré-cirúrgica ou recobro pós-cirúrgico com uma entrada extra grande para fácil acesso ao animal no interior da jaula/canil.
- Unidades/cx: 10

Mantas Térmicas para Animais - Descartáveis



Mantas Térmicas para aquecimento de animais

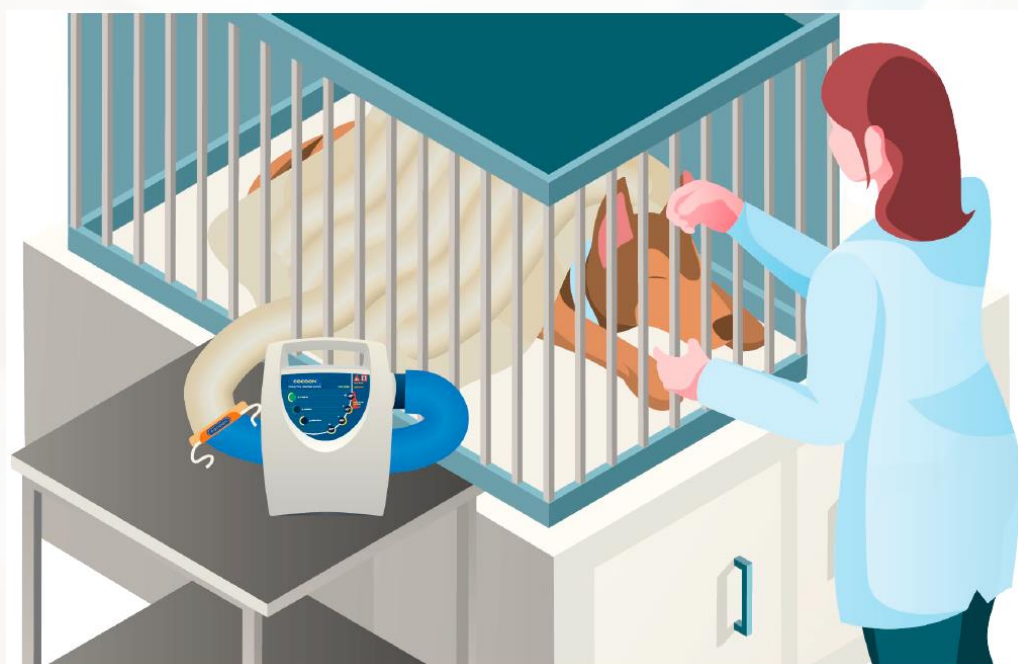

FABRICANTE:



Care Essentials Pty Ltd
103 Morningside Street, North Geelong, VIC 3215
Phone: +61 3 5277 1455 Fax: +61 3 5277 1411
Email: queries@careessentials.com.au

