



IMOBILIZADOR DE CLAVÍCULA

FI-600, FI-610

Cuidar com Excelência



IMOBILIZADOR DE CLAVÍCULA

FI-600, FI-610

INDICAÇÕES:

PARA LUXAÇÕES E FRATURAS DE CLAVÍCULA. PARA CORRIGIR TENDÊNCIAS DE CARGA DE OMBROS E A FORMAÇÃO DE CIFOSE.

REF. FI-600 PEDIÁTRICO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS ATÉ 30 KG DE PESO. É UMA PEÇA ALMOFADADA, SEM COLAS, FABRICADA COM PRODUTOS TÊXTEIS HIPOALERGÉNICOS, SOLDADOS ENTRE SI POR ULTRASSONS. POSSUI COMPONENTES DE VELCRO ESTRATEGICAMENTE INCORPORADOS PARA QUE QUANDO A FITA É COLOCADA EM FORMA DE OITO, POSSA SER APERTADA DE FORMA RÁPIDA E SEGURA. FÁCIL DE RETIRAR E VOLTAR A COLOCAR CADA VEZ QUE A CRIANÇA É LAVADA. PARA PACIENTES DE 30 A 110KG.

REF: FI-610 FABRICADO COM OS MESMOS COMPONENTES DA VERSÃO PEDIÁTRICA, É MAIS COMPRIDO, MAIS LARGO E TEM PONTOS DE SOLDADURA DE REFORÇO UMA VEZ QUE TEM QUE SUPOSTAR MAIS TENSÃO. COMO RESULTADO OBTÉM-SE UM PRODUTO COLOCADO SEM NECESSIDADE DE ANILHAS, COSTURAS OU CINTAS RÍGIDAS, QUE EM ÚLTIMA ANÁLISE DANIFICAM A PELE. ISENTO DE ESPUMA QUE GERA CALOR EXCESSIVO, CAUSANDO IRRITAÇÃO DA PELE.

- O PRODUTO DEVE SER MEDIDO PARA UMA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE A CORTAR.
- CALCULAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O PACIENTE E CORTAR O EXCESSO. UMA VEZ CORTADO, COLOCAR DA MESMA FORMA QUE SE MEDIU.
- RECOLOCAR O PRODUTO TENDO O CUIDADO DE EVITAR VINCAR AS AXILAS DO PACIENTE PROCEDENDO AO FECHO DO "OITO" RESULTANTE COM OS VELCROS QUE PODEM ADERIR A QUALQUER PARTE DO TECIDO.

REF: FI-600 - DIMENSÃO: 112CM - UNI./CX: 20

REF: FI-610 - DIMENSÃO: 144CM - UNI./CX: 25



FORNECEDOR:

2miil
MEDICAL DEVICES

2MIIL ARTESANÍA SANITARIA, S.L.
C/ TALLERES N31, POL. IND. 28430, ALPEDRETE, MADRID
WWW.2MIIL.COM | 2MIIL@2MIIL.COM
TLF: (+34) 91 630 92 08 | FAX: (+34) 91 279 36 59