

Imobilizador de clavícula

FI-600, FI-610

INDICAÇÕES:

Para luxações e fraturas de clavícula. Para corrigir tendências de carga de ombros e a formação de cifose.

REF. FI-600 pediátrico é adequado para crianças até 30 Kg de peso. É uma peça almofadada, sem colas, fabricada com produtos têxteis hipoalergénicos, soldados entre si por ultrassons. Possui componentes de velcro estrategicamente incorporados para que quando a fita é colocada em forma de oito, possa ser apertada de forma rápida e segura. Fácil de retirar e voltar a colocar cada vez que a criança é lavada. Para pacientes de 30 a 110Kg.

REF: FI-610 fabricado com os mesmos componentes da versão pediátrica, é mais comprido, mais largo e tem pontos de soldadura de reforço uma vez que tem que suportar mais tensão. Como resultado obtém-se um produto colocado sem necessidade de anilhas, costuras ou cintas rígidas, que em última análise danificam a pele. Isento de espuma que gera calor excessivo, causando irritação da pele.

- O produto deve ser medido para uma estimativa da quantidade a cortar.
- Calcular as medidas necessárias para o paciente e cortar o excesso. Uma vez cortado, colocar da mesma forma que se mediu.
- Recolocar o produto tendo o cuidado de evitar vincar as axilas do paciente procedendo ao fecho do “oito” resultante com os velcros que podem aderir a qualquer parte do tecido.

REF: FI-600 - Dimensão: 112cm - Uni./cx: 20

REF: FI-610 - Dimensão: 144cm - Uni./cx: 25



REF: FI-600 - Pediátrico - CDM: 32009267

REF: FI-610 - Adulto - CDM: 56900627

FABRICANTE:

2miil
MEDICAL DEVICES

2miil artesanía sanitaria, s.l.
C/ Talleres n31, Pol. Ind. 28430, Alpedrete, Madrid
www.2miil.com | 2miil@2miil.com
Tlf: (+34) 91 630 92 08 | Fax: (+34) 91 279 36 59

